



# protect.SIS

---

## Назначение

Отводящая шина protect.SIS может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения шины.

---

## Показания

- Вывихи плеча
- Необходимость иммобилизации акромиально-ключичного сочленения
- Растяжения связок плеча
- Повреждения сухожилий и сухожильных сумок мышц-вращателей плеча
- Необходимость иммобилизации при переломах верхней конечности

## Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

## Рекомендации по надеванию

- Перед использованием изделие необходимо постирать.
  - Оберните длинную ленту вокруг тела и застегните ее точно под грудью. Дополнительная лента, подшитая к бандажу, должна находиться с поврежденной стороны, а узкая лента с петлей для руки – со стороны спины (рис. 1).
  - Зафиксируйте поврежденную конечность при помощи дополнительной ленты, обернув ее вокруг руки (рис. 2).
  - Пропустите узкую ленту поверх здорового плеча. Кисть поврежденной руки поместите в специальную петлю (рис.3).
  - Отрегулируйте по длине ленту с петлей для руки. После этого закрепите петлю на груди при помощи застежки-«липучки» (рис. 4).
- 

## Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки- липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
  - Не отбеливать.
  - Сушите на воздухе.
  - Не гладьте.
  - Не подвергать химической чистке.
- 



## Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

**Материалы**

Полиамид, ПУ, полиэфир, хлопок

**Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

**Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.