

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

**БАНДАЖ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ
ПОЗВОНОЧНИКА (ШИНА ШАНЦА)**

NB-106

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- стабилизация и разгрузка шейного отдела позвоночника;
- ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника;
- фиксация положения головы и шеи в положении, снижающем нагрузку на мышцы и связочный аппарат;

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника.
- Болевой синдром в шейном отделе позвоночника.
- Остеохондроз и другие дегенеративные заболевания шейного отдела позвоночника.
- Вертебро-базилярная недостаточность.
- Миозит.
- Шейный корешковый синдром.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения бандажей Orlett (шин Шанца) назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов бандажа для шейного отдела;
- гнойно-септические заболевания кожи в области применения изделия;
- открытые раны в области применения изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При появлении дискомфорта в области применения бандажа следует немедленно прекратить использование изделия и проконсультироваться с врачом относительно его дальнейшего применения.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Бандаж Orlett на шейный отдел позвоночника (шину Шанца) размещают у передней поверхности шеи так, чтобы подбородок расположился в выемке по середине верхнего края шины Шанца. Шину застёгивают на задней поверхности шеи с помощью застёжки-липучки велкро, обеспечив плотное прилегание бандажа Orlett к коже по всей окружности шеи.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

Для корректного подбора бандажа Orlett на шейный отдел необходимо измерить сантиметровой лентой два параметра: окружность и высоту шеи. Первый параметр измеряется по длине окружности шеи у ее основания. Для определения второго параметра необходимо в вертикальном положении головы измерить расстояние от угла нижней челюсти до ключицы.

В соответствии с таблицей подбора размера подбирается нужный артикул (индекс) бандажа Orlett.

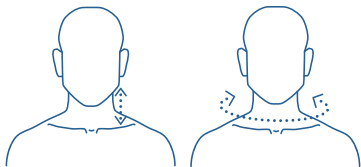


ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Артикул/индекс	Размеры, см	
	Окружность шеи	Высота шеи
1-8	27-36	8
2-8	36-46	8
1-10	27-36	10
2-10	36-46	10

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется при- мерить изделие. Важно, чтобы бандаж был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Правильный уход за бандажами Orlett на шейный отдел позвоночника позволяет сохранить лечебные свойства изделий в течение всего гарантийного срока службы изделия:

- стирать вручную при температуре не выше 30°C;
- не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор;
- не применять машинную стирку;
- отжимать не выкручивая;
- сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- сушить изделие рекомендуется в расправленном положении на горизонтальной поверхности.



СОСТАВ

43% полиуретановая пена, 16% полиэстер, 15% полиэтилен, 13% этиленвинилацетат, 10% полиамид, 3% эластан.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. Возможность использования изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования изделия без согласования с лечащим врачом.

Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия.
Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.
По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. NB-106, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74409 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

